


# 改善箇所説明図

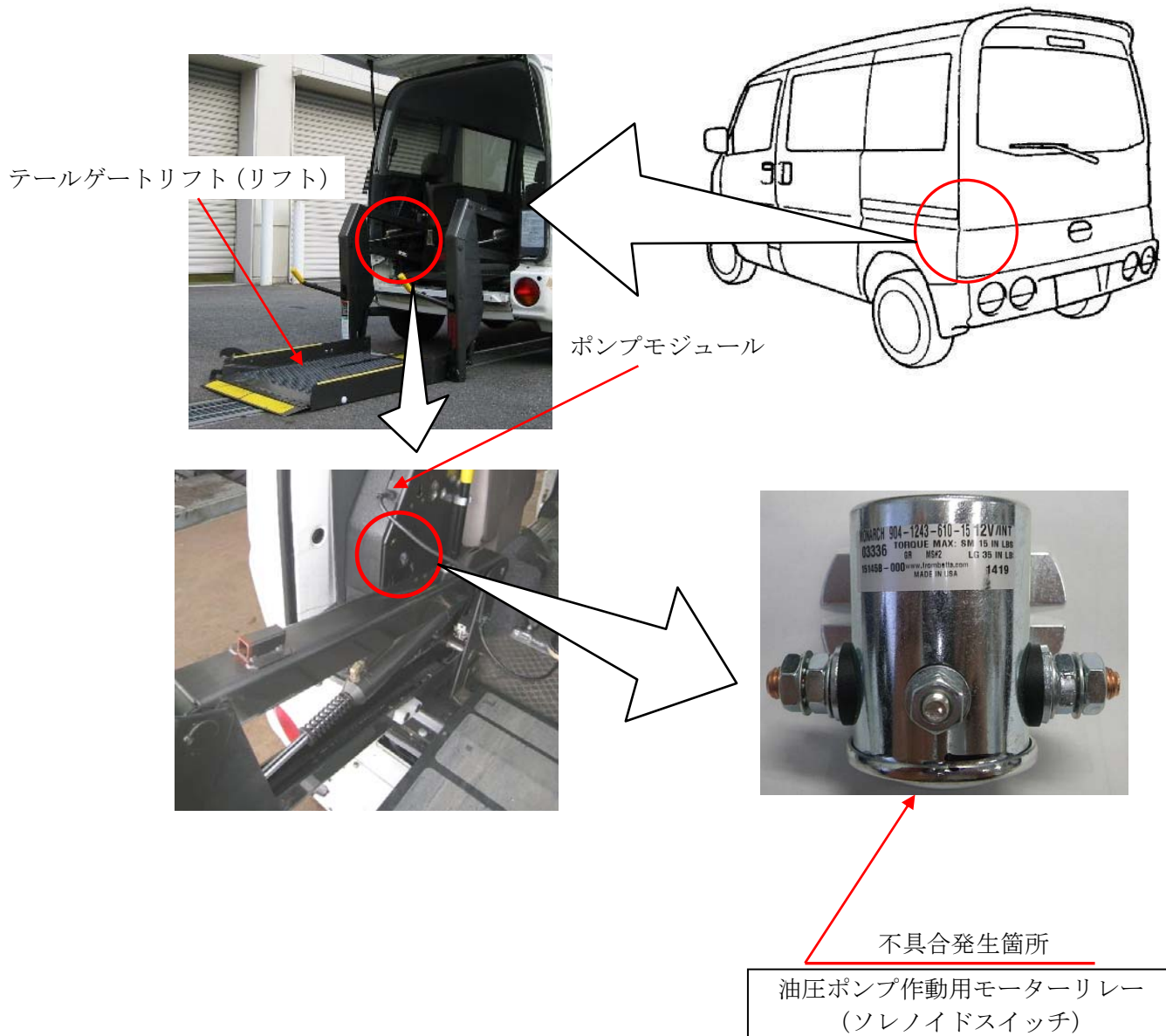

福祉車両（車いす用油圧式リフト仕様車）のリフトにおいて、油圧ポンプ作動用モーターリレー（ソレノイドスイッチ）の耐久性が不足しているため、長期間使用を続けると、当該スイッチの接点が固着することがある。そのため、リフトが上昇時に床面位置で自動停止せず折りたたまれ、最悪の場合、リフト上の乗客が車室内に押し出され、転倒するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、リフトの仕様を確認し、該当するものはリレー（ソレノイドスイッチ）を新品に交換する。また、当該リレーを定期交換部品とし、交換時期を明記したラベルを貼付する。

注：図中の  内は交換部品を示す。

識別：リフトのポンプモジュール側部に「ソレノイドスイッチ次回交換時期記載」のラベルを貼付ける。